

Etape 1 Réalisez le prélèvement




1
Notez votre nom, prénom
et date de naissance sur le tube.




2
Collez le papier de recueil
des selles sur les WC.




3
Allez à selles.
Les selles ne doivent pas
entrer en contact avec l'urine
ou l'eau des toilettes.

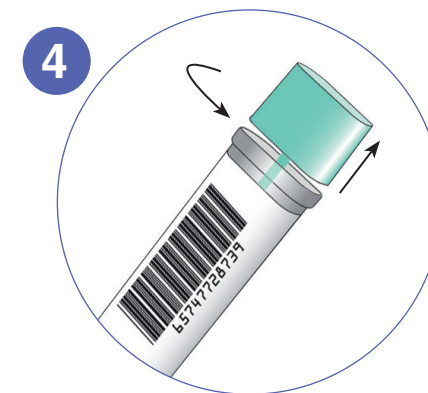

4
Ouvrez le tube
en dévissant le bouchon.
Attention à ne pas renverser
le liquide qu'il contient.

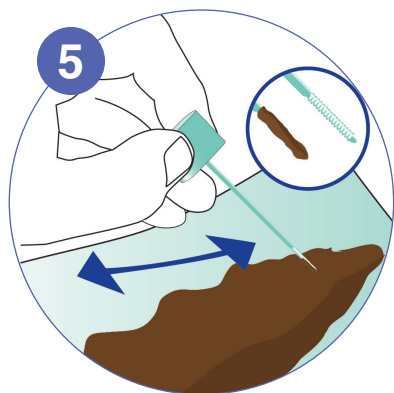

5
Grattez les selles en 5 à 6 endroits
différents avec la tige turquoise.
Tous les sillons de la tige
doivent être remplis de selles.

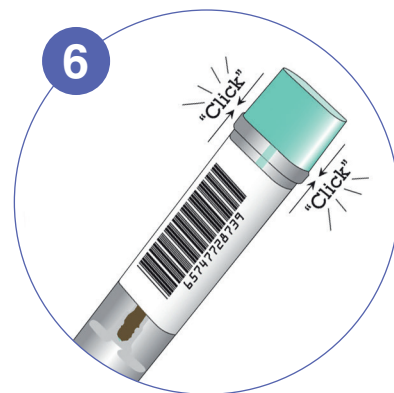

6
Remettez la tige dans
le tube et refermez-le.
Un clic sonore confirme
que le tube est bien fermé.
Secouez le tube.



7
Décollez l'étiquette « code-barres »
du tube et collez-la à l'endroit
indiqué sur la fiche de suivi.
(page suivante, point C)



8
Placez le tube dans
le sachet en plastique
et fermez-le.